

Allegato 5: "Assemblaggio e chiusura agobox"



DAI

ISTRUZIONI

► **Assemblaggio:**


Posizionare il coperchio sul corpo con l'apertura in corrispondenza dell'etichetta
Premere con forza sugli angoli opposti e poi sui lati
Si udiranno degli scatti ad ogni pressione che attestano la chiusura del coperchio



→ ► **Chiusura provvisoria:**

Abbassare il coperchietto tenendo la linguetta su "PROV" quindi bloccare la linguetta premendola sul bordino fino al click

► In questa posizione la riapertura è possibile

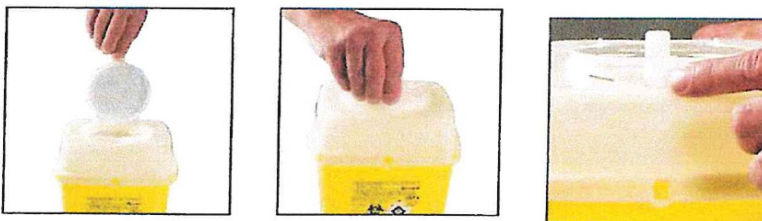

→ ► **Chiusura definitiva:**

Dalla posizione in chiusura provvisoria, premere fortemente sui 2 "DEF"



► **Sgancio aghi:**

Siringhe:
Utilizzare le tacche a "V" per sganciare l'ago della siringa

Penne insulina:
Introdurre nella tacca a "margherita" e svitare inclinando leggermente la penna verso l'alto (effetto del braccio della leva) prima di iniziare a svitarla

Orifizio di grande larghezza per permettere l'introduzione tra altri, di provette, emocultura, bisturi,...

