

**Allegato 1:**  
**“Sanificazione e disinfezione barella per bio-contenimento, barella di trasporto e accessori”**

**Sanificazione e disinfezione al termine del trasporto**

**Disinfezione della batteria**

A cura del personale sanitario che ha utilizzato la barella, quando la barella viene riportata per la sanificazione/disinfezione.

Utilizzare il prodotto con principio attivo alcool al 70% + 2% clorexidina idoneo alla disinfezione degli elettromedicali, le bustine si trovano vicino al caricabatterie, e gettare la salvietta utilizzata nei rifiuti a rischio infettivo insieme ai guanti indossati.

**Sanificazione/disinfezione barella per biocontenimento e barella di trasporto**

Cospargere con un panno monouso o carta il prodotto con alcool al 70% su tutta la superficie interna ed esterna accessori compresi (parte esterna dei filtri, cinture, ecc.) ed attendere 10 minuti per il tempo di contatto.

Ripetere di nuovo l'operazione precedente ed attendere 10 minuti di contatto.

La procedura deve essere fatta a barella aperta e a finestra aperta.

Raccogliere tutto il materiale utilizzato per la disinfezione nel contenitore per rifiuti a rischio infettivo. Trascorsi i tempi indicati rimontare la barella e riposizionarla nella prima stanza di degenza, passando con le ruote della barella di trasporto su telino imbevuto di disinfettante per superfici lavabili a base di ipoclorito di sodio.

**Disinfezione esterna della barella ogni qualvolta la barella esce dai reparti Covid con all'interno il paziente**

Cospargere con un panno monouso o carta il prodotto a base di alcool al 70% su tutta la superficie esterna ed attendere l'evaporazione del prodotto.